




Euro-Pulse

Full disposable Surgical Lavage Unit

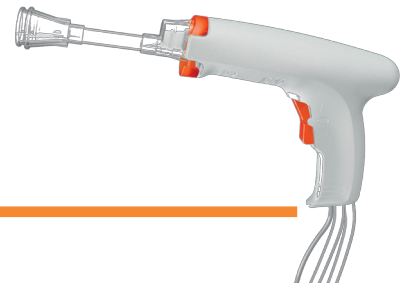

Gebruiksaanwijzing


Euro-Pulse Adapter Powered Artikelnummer PL-2000-OCT-A Ref. 2500238

Algemene beschrijving

De Euro-Pulse is een volledig disposable Surgical Lavage Unit, ontworpen voor het gebruik bij orthopedische en trauma ingrepen en algemene wondverzorging.

Dit pakket bevat:

- 1 x handstuk
- 1 x heupcanule artikelnummer CT02Z
- 1 x kniecanule artikelnummer ST01Z
- 1 x gebruiksaanwijzing

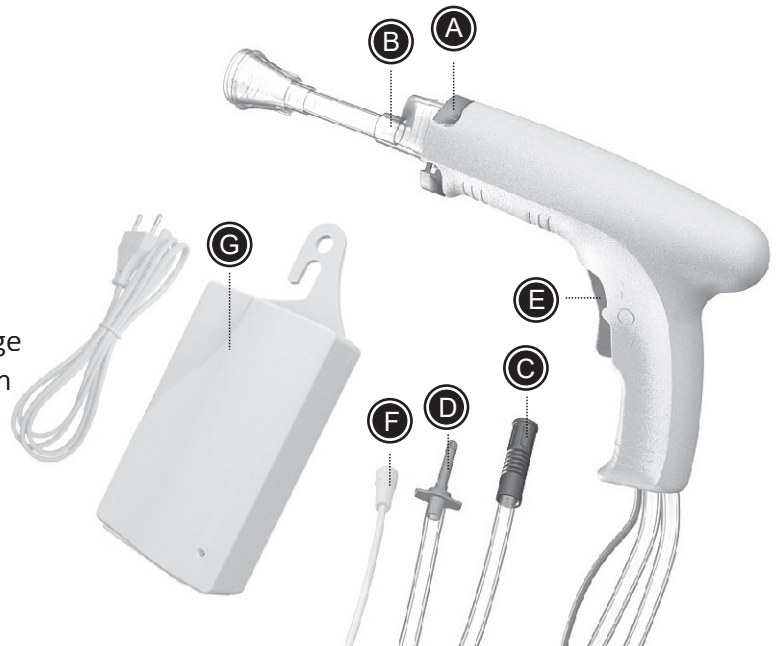

De adapter (G) is niet inbegrepen (art. nr. PL-2000-OCT-C).



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de voorschriften kan schade of letsel veroorzaken.

Handleiding


Elke unit is afzonderlijk verpakt in een kartonnen doos.
Euro-Pulse is dubbel steriel verpakt.

1. Maak de verpakking open en verwijder alle onderdelen.
2. Steek het stroomsnoer van de adapter (G) in het stopcontact.
Zodra het lampje groen brandt staat de adapter aan.
3. Steek het stroomsnoer (F) van het handstuk in de stroomingang van de adapter (G). Controleer of het snoer goed vast zit. Volg de oranje aanwijzing op de adapter.
4. Duw het vergrendelingsmechanisme (A) omhoog.
5. Bevestig de benodigde canule (B) aan het handstuk en druk de canule stevig aan.
6. Vergrendel de canule door het mechanisme (A) naar beneden te duwen totdat deze vast klikt.
7. Maak de irrigatieslang (D) vast aan de vloeistofzak.
8. Maak de zuigslang (C) vast aan de zuigpot.
9. Verwijder de beschermkap van de trigger (E).
Let op: start altijd met het spoelen in high speed flow door de bovenkant van de trigger in te drukken.
High speed spoeling: druk de bovenkant van de trigger in.
Low speed spoeling: druk de onderkant van de trigger in.
10. Het apparaat heeft een klem op de irrigatieslang zodat het lekken van irrigatievloeistof kan worden voorkomen.
11. Het apparaat heeft een verstelbare klem op de zuigslang.
12. Plaats de vloeistofzak niet hoger dan 50cm boven het operationeel vlak van het handstuk.
13. Wanneer u klaar bent, haal het stroomsnoer (F) uit de adapter (G) en gooi de disposable onderdelen van dit pakket weg.




Euro-Pulse

Full disposable Surgical Lavage Unit

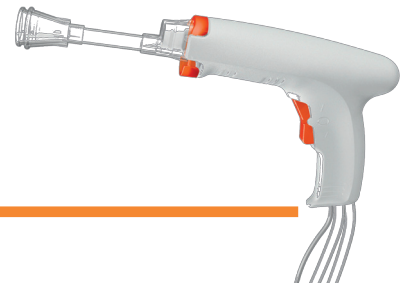


Euro-Pulse Adapter Powered PL-2000-OCT-A wordt geleverd inclusief heupcanule CT02Z en kniecanulie ST01Z.

CT02Z Euro-Pulse Coaxial Canal Tip

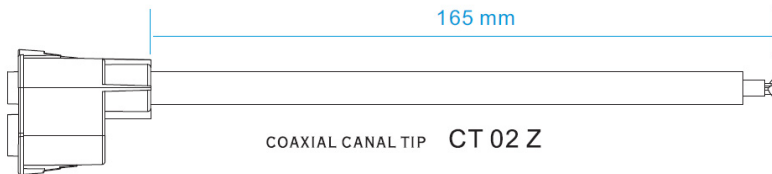

RADIAL SPRAY

ST01Z Euro-Pulse 30mm Cone Tip Fan Spray

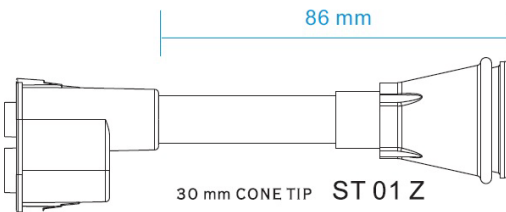

FAN SPRAY

Indicaties

- Botreiniging bij arthroplastieken
- Wondreiniging

Afvoeren

- Verwijder alle stekkers voor u het apparaat verwijderd.
- Verwijder alle single-use onderdelen direct na gebruik.
- Draag er zorg voor dat het apparaat veilig verwijderd wordt in overeenstemming met de nationale en internationale richtlijnen voor afvalverwijdering.
- Neem voor vragen over de afvalverwerking contact op met de lokale autoriteiten.

Specificaties

- Aanpasbare spray druk: hoog en laag
 - Druk < 1034 mBar
 - Pulse frequentie 1500 ~ 1700 cycles/min
 - Hoge druk 1100 ~ 1400 ml/min (30mm Cone Tip)
 - Hoge druk 1000 ~ 1300 ml/min (Coaxial Tip)
 - Lage druk 700ml/min
 - Tube lengte 3 meter
 - DC  8V input
 - Hoge snelheid/druk DC  8.0V / 24W
 - Lage snelheid/druk DC  6.0V / 14.5W
- (gegevens kunnen variëren afhankelijk van type stroombron, tip, afstand en duur van de behandeling)

Contra-indicaties

- Niet gebruiken bij hevig bloeden.

Houdbaarheid

- Drie jaar.

Gebruiksaanwijzingen

- Temperatuur 10°C ~ 25°C
- Luchtvochtigheid 30% ~ 75%RH
- Luchtdruk 860hPa ~ 1060hPa
- Maximale hoogte: 2000m boven zeeniveau

Transport en opslag

- Temperatuur 5°C ~ 40°C
- Luchtvochtigheid 15% ~ 85%RH
- Luchtdruk 860hPa ~ 1060hPa



Dongguan Kaiser Technology Co., Ltd.
No.81 Sanjiang Industrial District
523462 Hengli Town, Dongguan, China



MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster, Germany



CE
0197



STERILEEO


Do not re-sterilize

Distributie door:
Oudshoorn chirurgische techniek B.V.
Wethouder van Eschstraat 38
5342 AT Oss
Nederland
info@oudshoornbv.com
www.oudshoornbv.com



Euro-Pulse

Full disposable Surgical Lavage Unit

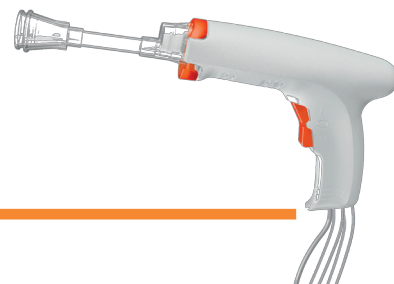

Waarschuwing

Het niet opvolgen van de instructies kan persoonlijk letsel veroorzaken.

- Euro-Pulse mag alleen gebruikt worden door orthopedisch chirurgen en medisch/chirurgische professionals met ervaring in de wondzorg.
- Draag beschermende kleding, zoals vloeistofwerende OK jassen, handschoenen, masker, bril of gezichtsschermb.
- Dek de niet te behandelen delen van de patiënt af.
- Bij toepassing op en rond zenuwen, pezen en botten: neem voorzorgsmaatregelen afhankelijk van de toestand van het weefsel en op basis van het oordeel van het medisch professioneel personeel.
- Gebruik voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen.
- Product is alleen steriel wanneer de verpakking niet geopend en onbeschadigd is.
- Handstuk- éénmalig gebruik! Niet hersteriliseren!
- Adapter en oplaadbare batterij- herbruikbaar product / Niet steriel!
- Gebruik geen beschadigde of defecte instrumenten.



LET OP!

Het niet opvolgen van deze instructie kan schade aan het product veroorzaken.

- Gebruik dit hulpmiddel NIET op enkele andere manier, dan waar het voor bedoeld is of op een andere manier dan in deze handleiding beschreven wordt.
- NIET onderdompelen in vloeistof.
- NIET laten vallen of op slaan.
- Opbergen op een koele droge plaats.
- Geen enkele aanpassing aan dit apparaat is toegestaan.
- Gebruik alleen door Kaiser Technologies goedgekeurde adapter/accu en accessoires.
- Verwijder alle single-use onderdelen direct na gebruik.
- Internationale wetgeving beperkt de verkoop van dit apparaat tot verkoop door of op voorschrift van een arts.
- De gebruiker/patiënt moet elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van zijn land/lidstaat.

Symbolen

	Raadpleeg gebruiksaanwijzing		Latex vrij
	Waarschuwing		Waarschuwing voor voortijdig uitpakken
	Niet gebruiken indien beschadigd		Body Floating
	Niet hergebruiken		Gelijkstroom
	Drooghouden		Bruikbaar tot
	Temperatuur begrenzing		Datum van productie
	Gesteriliseerd met ethylene oxide		Richtlijnen afvalverwijdering EU
	Volgens EU-richtlijnen		Raadpleeg gebruiksaanwijzing voor gebruik
	Fabrikant		Medisch hulpmiddel
	Bevoegd vertegenwoordiger in EU		Artikelnummer
	Beschermd tegen vaste voorwerpen: >12,5mm		Lotnummer

Dongguan Kaiser Technology Co., Ltd.
No.81 Sanjiang Industrial District
523462 Hengli Town, Dongguan, China

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster, Germany



Distributie door:
Oudshoorn chirurgische techniek B.V.
Wethouder van Eschstraat 38
5342 AT Oss
Nederland
info@oudshoornbv.com
www.oudshoornbv.com