




Euro-Pulse

Full disposable Surgical Lavage Unit

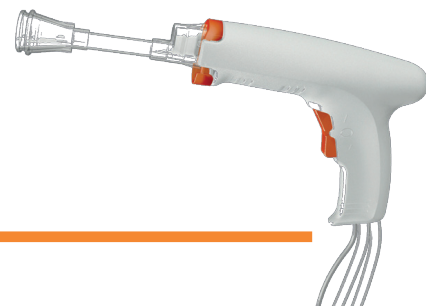

Gebruiksaanwijzing

230V Adapter

Artikelnummer PL-2000-OCT-C

Ref. 2500157

Algemene beschrijving

Herbruikbare adapter:

- A. Lampje
- B. Stroom uitgang (naar de Surgical Lavage Unit)
- C. Stroom ingang
- D. Aardpotentiaal aansluiting



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de voorschriften kan schade of letsel veroorzaken.

Handleiding

1. Maak de verpakking open en verwijder alle onderdelen.
2. Steek het adapter snoer in de stroomingang (C) en steek het uiteinde van het snoer in het stopcontact. Zodra het lampje groen (A) brandt staat de adapter aan.
3. Steek het netsnoer van de Surgical Lavage Unit in de adapter (B) en controleer of het snoer goed vast zit.
4. Hang de adapter aan een infuusstandaard of aan een andere geschikte plek.

Transport en opslag

- Temperatuur: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Luchtvochtigheid: $<75\%\text{RH}$

Specificaties

- AC ingang: 100 ~ 240 V 1.0A 50 ~ 60Hz
- DC uitgang: 8V --- 3.0A



 Dongguan Kaiser Technology Co., Ltd.
No.81 Sanjiang Industrial District
523462 Hengli Town, Dongguan, China

 MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster, Germany




Distributie door:
Oudshoorn chirurgische techniek B.V.
Wethouder van Eschstraat 38
5342 AT Oss
Nederland
info@oudshoornbv.com
www.oudshoornbv.com



Euro-Pulse

Full disposable Surgical Lavage Unit

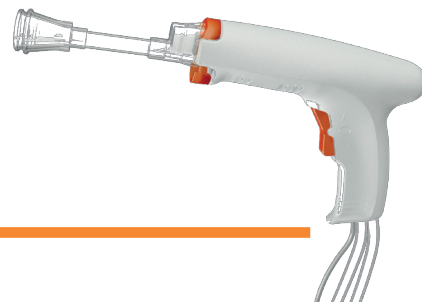

Waarschuwing

Het niet opvolgen van de instructies kan persoonlijk letsel veroorzaken.

- Gebruik geen beschadigde of defecte instrumenten.
- NIET gebruiken in natte en vochtige ruimtes.
- Gebruik alleen de bijbehorende stroomkabel.
- Zorg voor genoeg ventilatie, om oververhitting tegen te gaan.
- Alleen te gebruiken in combinatie met Surgical Lavage Unit
- Herbruikbaar. Niet steriel!

Reiniging

Reinig het product met een vochtige doek met mild schoonmaakmiddel en water. Gebruik geen schoonmaakspray. Voorkom dat er vocht in de aansluiting komt.



Draag er zorg voor dat het apparaat veilig verwijderd wordt in overeenstemming met de nationale en internationale richtlijnen voor afvalverwijdering. Bij vragen, neem contact op met de lokale autoriteiten voor afvalverwijdering.



LET OP!

Het niet opvolgen van deze instructie kan schade aan het product veroorzaken.

- NIET onderdompelen in vloeistof.
- NIET laten vallen of op slaan.
- Opbergen op een koele droge plaats.
- Geen enkele aanpassing aan dit apparaat is toegestaan.
- Gebruik dit hulpmiddel NIET op enkele andere manier, dan waar het voor bedoeld is of op een andere manier dan in deze handleiding beschreven staat.
- Draag er zorg voor dat het apparaat veilig afgevoerd wordt in overeenstemming met de nationale en internationale richtlijnen voor afvalverwijdering.
- Internationale wetgeving beperkt de verkoop van dit apparaat tot verkoop door of op voorschrift van een arts.
- De gebruiker/patiënt moet elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van zijn land/lidstaat.

Symbolen



Raadpleeg gebruiksaanwijzing



Waarschuwing



Niet gebruiken indien beschadigd



Dubbel verpakt



Drooghouden



Temperatuur begrenzing



Gebruik alleen binnenshuis



Volgens EU-richtlijnen



Fabrikant



Bevoegd vertegenwoordiger in EU

IP2X Beschermd tegen vaste voorwerpen: >12,5mm



Waarschuwing voor voortijdig uitpakken



Body Floating



Gelijkstroom



Bruikbaar tot



Datum van productie



Richtlijnen afvalverwijdering EU



Raadpleeg gebruiksaanwijzing voor gebruik



Medisch hulpmiddel



Artikelnummer



Lotnummer



Donguan Kaiser Technology Co.,Ltd.
No.81 Sanjiang Industrial District
523462 Hengli Town, Dongguan, China



MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster, Germany



Do not re-sterilize

Distributie door:
Oudshoorn chirurgische techniek B.V.
Wethouder van Eschstraat 38
5342 AT Oss
Nederland
info@oudshoornbv.com
www.oudshoornbv.com